

beurer medical

kurzanleitung

mmol/L

GL40

DE

Codefree



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: 08006645222 • E-Mail: kd@beurer.de • www.beurer-medical.de

Lancet needles / Lanzetten / lancettes / lancetas / lancette:



SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No. 168, PuTuoShan Road,
New District, Suzhou 215153, China

EC REP

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague, The Netherlands

CE 0483

IVD

Vor dem ersten Gebrauch



Lesen Sie vor der ersten Blutzucker-Messung unbedingt die ausführliche Gebrauchsanweisung.

Kontrollieren Sie die Messeinheit gemäß Gebrauchsanweisung.

Infektionsgefahr



Das Messgerät und das Zubehör können mit menschlichem Blut in Kontakt kommen und stellen darum eine mögliche Infektionsquelle dar.


- Benutzen Sie Messgerät, Stechhilfe und Zubehör nie gemeinsam mit anderen Personen.
- Beachten Sie bei Verwendung des Messsystems an unterschiedlichen Personen die allgemein gültigen Hygiene-Vorschriften.
- Verwenden Sie bei jeder Blutprobe eine neue sterile Nadel-Lanzette.
- Hände vor der Blutprobe mit warmen Wasser und Seife reinigen und abtrocknen.

Stechhilfe und Gerät vorbereiten




Lanzette einsetzen

Kappe von der Stechhilfe abdrehen. Nadel-Lanzette in die Stechhilfe einlegen. Nadel-Lanzette am Schaft festhalten und Schutzscheibe abdrehen. Schutzscheibe aufbewahren. Kappe auf die Stechhilfe setzen und festdrehen. Kappe drehen, bis Pfeil auf die gewünschte Einstechtiefe zeigt. Spannvorrichtung zurückziehen, bis sie einrastet.

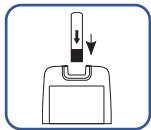

Teststreifen einsetzen

Teststreifen mit den Kontakten voraus in das Messgerät stecken. Kurz warten bis nach kurzer Anzeige des Startbildschirms das blinkende Hand- und Blutstropfen-Symbol auf dem Display zu sehen ist.

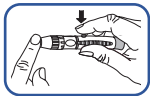


Stechen

Stechhilfe leicht seitlich von der Mitte fest auf der Fingerbeere ansetzen. Auslöseknopf drücken.

Der gewonnene Blutstropfen muss:

- tropfenförmig sein und darf nicht verschmiert werden
- mindestens 1,4 mm groß sein (Originalgröße ●).

Blut auf Teststreifen auftragen

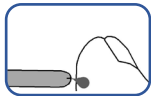

Blutaufnahme-Spalt des Teststreifens an den Blutstropfen halten bis der Spalt vollständig gefüllt ist und ein Piepton zu hören ist. Etwa 5 Sekunden warten bis der gemessene Blutzucker-Wert auf dem Display angezeigt wird.

Normalwert: 2 Stunden nach dem Essen: 3,9–7,8 mmol/L
nüchtern: 3,9–5,6 mmol/L



Lanzette entsorgen

Kappe abdrehen. Aufbewahrte Schutzscheibe auf eine Fläche legen und mit der Nadelspitze aufspießen. Lanzette mit dem Lanzetten-Auswerfer aus der Stechhilfe herauschieben. Teststreifen und Lanzette ordnungsgemäß entsorgen. Kappe aufsetzen und festdrehen.

Kritische Messwerte beurteilen

Lo	Unterzucker < 1,1 mmol/L	Sofortige Behandlung durch einen Arzt notwendig.
3.6	Niedriger Blutzucker < 3,9 mmol/L	Zwischenmahlzeit essen. Anweisungen des Arztes befolgen.
8.3	Hoher Blutzucker nüchtern > 5,6 mmol/L 2 Std. nach dem Essen > 7,8 mmol/L	Arzt aufsuchen.

15.7 16.1	Hoher Blutzucker, ggf. Ketone > 13,3 mmol/L	Ketontest empfohlen. Dazu Arzt befragen.
H ,	Sehr hoher Blutzucker > 35,0 mmol/L	Mit neuem Teststreifen messen. Bei gleicher Anzeige sofort Arzt aufsuchen.

Meldungen auf dem Display

LP	Leere Batterien	Alle Batterien ersetzen.
Ht bzw. Lt	Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs	Test mit neuem Streifen wiederholen bei Raumtemperatur +20°C bis +25°C.
Err	Gebrauchter oder verunreinigter Teststreifen	Neuen, nicht verfallenen Streifen einlegen und Messung wiederholen.